



mama hanamizu totte

ママ鼻水トットテ 電動鼻すい器

www.tampeico.jp/products/MHD/

発売元: 丹平製薬株式会社
大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号
製造販売元: 日光精器株式会社
滋賀県近江八幡市馬淵町2660

医療機器認証番号: 303AKBZX00025000



GOOD DESIGN AWARD
2021年度受賞



KIDS DESIGN
AWARD 2021



mama hanamizu totte

赤ちゃんへのやさしさ・快適性を
第一に考えた電動鼻すい器

QUALITY OF

mama hanamizu totte



静音設計

音が静かで、しっかり吸える



お手入れカンタン

鼻水タンクを洗うだけ！

驚くほど静かに
どんな鼻水もスッキリ



衛生的に収納できる

本体に部品がコンパクト収納



移動もラクラク

ハンドルがついて持ち運びに便利！



奥の鼻水にもしっかり届く

Wの力の
パワフル
吸引

赤ちゃんのことを考えた 医療機器スペックの吸引力

ネバネバやドロドロの鼻水はお鼻の奥に溜まりがち…。
奥の鼻水までしっかり届く吸引力でしつこい鼻水もスッキリ。

POINT
1

静音設計とパワフル吸引

会話より小さな音だから、赤ちゃんがビックリしません。
ママ・パパの声が聞こえるから、赤ちゃんも安心です。



ママ・パパの
声が聞こえる



mama
hanamizu
totte

54dB*



普通の会話

60-70dB



電車のベル

70-80dB

*最頻値です。保証値ではありません。

Wの力の
パワフル
吸引

吸引力とは2つの力のこと

吸引流量*

14.0L



吸引圧*

-55kPa

POINT

どちらか一方の力のみ高くても十分な吸引はできません。2つの力が重要です。

※吸引流量(排気流量)とは1分間にどれぐらいの空気を吸うことができるかという数値となります。数値が大きいとそれだけ吸う力が強いので、鼻水を早く吸引できるということになります。 ※吸引圧とは鼻水を吸い寄せる力のことです。吸引圧が強ければ、吸う力も強くなりますが、鼓膜などへの負担も大きくなりますので、赤ちゃんに適した吸引圧のものを選んでください。

POINT 2 お手入れカンタン

チューブのお手入れ不要です。
先端の鼻水タンクに鼻水がたまるから、4つのパーツを洗うだけでOK。
洗いにくく、乾きにくいチューブを洗う必要がありません。
食器洗い乾燥機でも洗えます。



食器洗い
乾燥機でも
洗える



手洗いで
簡単

POINT 3 衛生的に使える

レンジ・煮沸・薬液での消毒が可能で、衛生的に使えます。
また、本体の専用ケースに収納できるので、赤ちゃんに触れる部分にほこりが付かず安心です。

選べる消毒方法



レンジOK



煮沸OK



消毒液OK



スッキリ

チューブと
ノズル・タンクは
本体に保管
できる!




All in



チューブは
くるくる
巻くだけ

POINT 4 軽くて持ち運びもラクラク

母子手帳(親手帳)2枚分の大きさ
一般的な母子手帳(Mサイズ)の2枚分の大きさです。

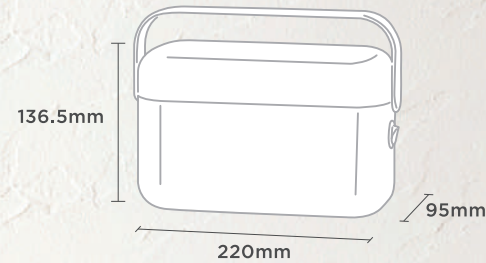

約0.9kg
軽量設計



ハンドルつき
で持ち運び
やすい

どんな姿勢でも吸える

お子さまが安心できる
楽な姿勢で使えます。
寝かせた状態・抱っこ、
どんな姿勢でも、
しっかり吸引できます。

寝かせた
状態



抱っこ



カンタンに使える

むずかしい操作は不要。
ボタンひとつで吸引
できます。

HOW TO USE

鼻すい器使い方・吸引のコツ

Q どの姿勢で吸ったらいい？

お子さまが安心できる楽な姿勢で使えます。
寝かせた姿勢・抱っこ姿勢、どの姿勢でも、使用することができます。

寝かせた姿勢



床に座ってひざや太ももで頭を押さえ、上から覗き込むようにして吸う



床に座って、上から覗き込むようにして吸う

抱っこの姿勢



横向きに抱き、手で頭を支えながら吸う



対面に座り、子供が楽な姿勢で吸う

鼻水の状態に合わせて吸引する方法

水っぽい鼻水……先端ノズルを鼻の穴から少しずらし、空気と一緒に吸引すると楽に吸い取れます。

固くなった鼻水……ベビーオイル等を含ませた綿棒等で先に取り除いておくと、より奥の鼻水まで吸い取れます。

POINT 鼻水が柔らかくなるお風呂上がりにケアするのがオススメ

Q 何歳まで使える？

新生児から使えて、ママ・パパ・お兄ちゃん・お姉ちゃん家族みんなで使えます。

※複数人で使用される場合は感染防止のため、先端ノズルを人数分ご用意いただくか、使用の際に毎回消毒の上、使用してください。



Q 赤ちゃんが吸引されるのを嫌がらないか不安…

ママ・パパの声が聞こえる音の静かさなので、声をかけながら鼻水を吸引してあげてください。

Q 洗浄はいつのタイミングでやればいい？

使用後は毎回洗浄と乾燥が必要です。
鼻水が先端タンクにたまるので、洗にくいチューブは洗浄不要です。
食器洗い乾燥機が使用できるので、すぐに乾燥できて必要な時に使えます。



Q 食器洗い乾燥機で洗う時のポイントは？

小さな部品なので、市販の蓋つきバスケットなどに入れてご利用ください。
気になる方は先に軽く水で流してから、食器洗い乾燥機で洗ってください。



Q 耳が痛くならないか心配…

ノズルを軽く押し当てて、吸っているほうと逆の鼻をふさがないように注意し、1回の吸引を5秒以内で数回に分けて吸引してあげてください。