

類別: 機械器具 32 医療用吸引器 管理医療機器
一般的名称: 電動式可搬型吸引器 (JMDNコード: 36616030)

ママ鼻水トッテ 電動鼻すい器

【警告】

[事故や身体への著しい障害を招く恐れがあります。]

- ・ 鼻腔の鼻汁の吸引以外の目的で、本品を使用しないでください。
- ・ 使用の際は急激な吸引を避ける為、鼻腔に対し先端ノズルを少し離れた位置から徐々に近づけるように吸引してください。
- ・ 長時間の鼻腔への接触、吸引はしないでください。

【禁忌・禁止】

[事故や体調不良をおこす恐れがあります。]

- ★ 他の医療機器との併用はしないでください。
- ★ 次の人は、使用前に医師に相談してください。
 - － 体温 38℃以上(有熱期)の人(例 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱している場合)
 - － 安静を必要とする人
 - － 吸引する部位に異常(感染症、傷など)のある人
- ★ 使用によって鼻腔の炎症、出血、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- ★ 使用後および他の人に使用する際は必ず一度洗浄・消毒を行ってください。


[事故やけがの恐れがあります。]

- ★ 身体及び機器に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ★ お子さまだけで使用させないでください。
- ★ お子さまの手の届く場所に保管しないでください。
- ★ 先端ノズルを鼻腔の奥まで挿入し過ぎないでください。
- ★ 吸引後は本体の電源を切ってください。
- ★ 本体底面の排気口を塞がないでください。

[発火や、感電・けがの原因になります。]

- ★ 専用ACアダプターに他の製品を接続して使用しないでください。
- ★ 機器は分解・修理・改造をしないでください。
- ★ 機器が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
- ★ 本体を稼働させたまま放置しないでください。(本体が加熱するおそれがあります)

【形状・構造及び原理等】

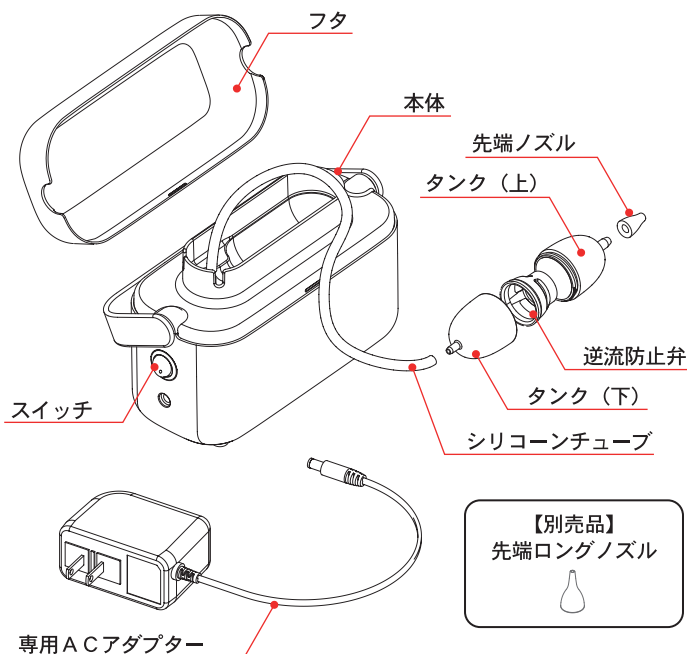

取扱説明書を必ず参照ください

1. 構成

- ・ 本体(フタ含む): 一式
- ・ 鼻水タンク: 一式
[タンク(上)、タンク(下)、逆流防止弁、先端ノズル(シリコンゴム)]
- ・ 専用ACアダプター: 1台
- ・ 取扱説明書: 1冊
- ・ 医療機器添付文書(本書): 1部
- ・ 【別売品】先端ロングノズル(シリコンゴム): 1個

2. 本体寸法および重量

- ・ 寸法: (約)幅 220×奥行き 95×高さ 136.5mm
- ・ 質量: 880g

3. 機器の分類

- ・ 電撃に対する保護の形式: クラスII
- ・ 電撃に対する保護の程度: B形装着部

4. 専用ACアダプター

- ・ ママ鼻水トッテ 電動鼻すい器専用
- ・ 品番: UMWUU3024-120020SA

5. 電気的定格(専用ACアダプター)

- ・ 定格入力: 100V 50/60Hz
- ・ 定格出力: DC12.0V 2.0A
- ・ 本体定格: DC12.0V 1.6A以下

6. 動作原理

本体内のポンプモーターにより陰圧を発生させ、この陰圧を使用し先端ノズルから鼻腔内の鼻汁を吸引する。

【使用目的又は効果】

鼻腔内に溜まった鼻汁の吸引に用いる。

【使用方法等】

1. 準備(組み立て)

- ①: タンク(下)の突起部分に逆流防止弁を差し込んでください。
- ②: タンク(上)とタンク(下)を合わせ時計回りに回転させながら回してセットしてください。
- ③: 先端ノズルを、タンク(上)の先端部にしっかりと突き当たるまで差し込んでください。鼻の穴の大きさや鼻水の粘度によって【別売品】の先端ロングノズルを使い分けてください。
- ④: シリコンチューブをタンク(下)の先端部に差し込みます。
- ⑤: シリコンチューブを、本体上部の吸気口に差し込みます。
- ⑥: 本体のスイッチが「OFF」になっていることを確認します。
- ⑦: 専用ACアダプターを、本体の側面の穴に差し込んだ後、コンセントに差し込みます。

2. 吸引

- ①: 先端ノズルが、タンク(上)の先端部にしっかりと差し込まれていることを確認します。
- ②: 鼻水タンクを手で持ち、本体のスイッチを「ON」にして電源を入れ、先端ノズルを指で押さえ吸引できているかを確認します。
- ③: 鼻の穴に挿入し、数回に分けて吸引します。

3. 使い終わったら

- ①: スwitchを「OFF」にし、専用ACアダプターを、コンセント・本体から外します。
- ②: 鼻水タンクを分解してぬるま湯に浸けて洗浄し、乾燥させます。
- ③: シリコンチューブを、本体上部に巻いた後、洗浄した鼻水タンクを入れ、フタがカチッとなるまで閉めてください。

4. 部品の消毒（消毒できる部品は取扱説明書を参照ください）

消毒は下記①～③のいずれかの方法にて消毒してください

①: 薬液消毒の方法

哺乳瓶・乳首などの消毒液を使用します。消毒液の希釈濃度・浸け置き方法は、各消毒液の使用方法に従いお使いください。

②: 煮沸消毒の方法

大きな鍋に水をたっぷり入れ、火にかけて沸とうさせます。（消毒時間は、沸とう後 3～5 分）

③: レンジ消毒の方法

電子レンジ消毒専用の容器を使います。詳しくは、電子レンジ消毒専用の容器・ご使用の電子レンジの取扱説明書に従ってください。

【 使用上の注意 】

1. 使用環境および使用条件

- ①: 浴室などの湿気が多い所、水のかかりやすい所での使用は危険ですので絶対にしないでください。
- ②: 他の治療器との同時使用はしないでください。
- ③: 使用 $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}/75\%RH$ 以下

2. 使用前の注意事項

- ①: 使用する際は専用 AC アダプターを正しく、かつ確実に接続してください。
- ②: 使用前にスイッチが正しく作動するかを確認してください。
- ③: しばらく使用しなかったときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。
- ④: 吸引前には先端ノズルが鼻水タンクに取り付けられているかを確認してください。

3. 使用中の注意事項

- ①: 同一箇所への使用は 5 秒以内としてください。
- ②: 先端ノズルを無理に鼻の奥まで押し込まないでください。
- ③: お子さまが痛がる場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- ④: 吸引中は、先端ノズルが鼻の内側の皮膚に触れないようにしてください。

4. 使用後および保管の注意事項

- ①: 使用後は鼻水タンクをシリコンチューブから外し、鼻水タンクの洗浄を行ってください。必要に応じて消毒を行ってください。
- ②: 専用 AC アダプターを取り外す際は、コード部分を持つのではなくプラグ部分を持って引き抜いてください。

【 保管方法及び有効期間等 】

- ①: 不安定な場所・お子さまの手の届く場所には保管しないでください。
- ②: 高温多湿な場所での使用・放置・保管はしないでください。
- ③: 火気の近くや車内などの高温になる場所、直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。（変形・変色のおそれがあります）
- ④: 保管 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}/75\%RH$ 以下

【 取り扱い上の注意 】

- ①: 別売品、並びに寿命の終わった機器および付属品の廃棄に関しては、地域の定める条例に従って廃棄してください。
- ②: 付属の専用 AC アダプターは本器の使用以外には用いないでください。

【 保守・点検に係る事項 】

- ①: 本体をお手入れする時にベンジンやシンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- ②: 薬液消毒する際は各消毒液の使用方法に従ってください。また、消毒後は必ず水洗いし陰干しで十分に乾燥させてください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元 : 日光精器株式会社

住 所 : 〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町 2660

電 話 : 0748-37-7581

発売元 : 丹平製薬株式会社

住 所 : 〒567-0051 大阪府茨木市宿久庄 2 丁目 7 番 6 号

電 話 : 0120-500-461